


INSTRUCTIONS D'APPLICATION


A Tenir le bas et insérer la main jusqu'au talon. Saisir le talon et retourner complètement le bas jusqu'à la zone du talon.



B Placer le bas sur le pied en veillant à ce que la fenêtre dédiée à l'inspection des orteils soit positionnée en amont des orteils et que le talon soit bien centré.

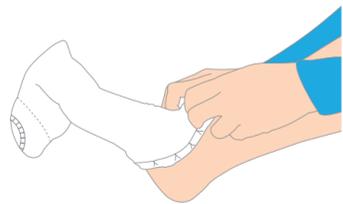

C Déployer le bas ou le mi-bas (en tirant doucement) sur la cheville, puis le mollet. Pour les bas, déployer ensuite (toujours en tirant doucement) le bas sur la cuisse. Faites effectuer ensuite une rotation au bas de manière à positionner la zone anti-pression à l'intérieur de la cuisse.

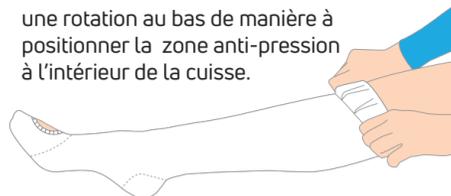

D Lisser les plis. Veiller à bien ajuster le collant au niveau des orteils et des chevilles.



INDICATIONS / CONTRE-INDICATIONS

Indications

Les bas anti-thrombose VenaPure™ Aircast sont conçus pour prévenir les thromboses veineuses profondes chez les patients médicaux et chirurgicaux.

- Ils procurent une compression graduelle qui décroît du bas vers le haut de la jambe.
- Ceci permet de générer un effet de pompage en accélérant le retour veineux, de prévenir la formation de caillots sanguins (embolie) et de réduire le gonflement des jambes.

Les bas anti-thrombose VenaPure™ Aircast sont indiqués pour une utilisation pré-opératoire et post-opératoire, pour les patients alités et les maladies telles que les troubles veineux et les varices.

Contre-indications

- Dermatite avec plaie ouverte ou gangrène.
- Artériosclérose grave, autre maladie vasculaire ischémique ou absence de pouls pédiex.
- Œdème excessif ou déformité extrême de la jambe.
- Diabète avec circulation compromise.

INSTRUCTION D'ENTRETIEN

Pour un usage unique

Composition : 90% Polyamide, 10% Elasthanne - Sans latex

Nombre de lavages recommandé : environ 30

(Il est conseillé de remplacer sa paire de bas en moyenne tous les 3 jours.)



VenaPure™

Compression anti-thrombose

CONDITIONNEMENT

Polybag

Contient une paire de bas.



Boîte distributrice

Les polybags sont conditionnés dans une boîte distributrice :

- Mi-bas : 12 paires par boîte
- Bas (avec ou sans ceinture) : 6 paires par boîte



Étiquetage des boîtes distributrices

Les étiquettes sur la boîte distributrice indiquent le modèle (mi-bas, bas avec ou sans ceinture), la taille, le code couleur et le code EAN.



Mètre ruban

Chaque boîte distributrice contient 1 mètre ruban.



Distribué par DJO France - Centre Européen de Frêt - 3 rue Bethar - 64990 Mouguerre
Tél : 05 59 52 86 90 - Fax : 05 59 52 86 91 - Email : sce.cial@DJOGlobal.com - www.DJOGlobal.fr
Fabricant : DJO LLC - 1430 Decision Street - Vista - CA 92081-8553 - USA

Lire attentivement la notice avant utilisation.
Tous les produits présentés dans ce document sont des dispositifs médicaux de classe I selon la directive européenne 93/42/CEE.


VenaPure™ Bas anti-thrombose



Compression dégressive

INFORMATION PRODUITS

Panorama des caractéristiques VenaPure™

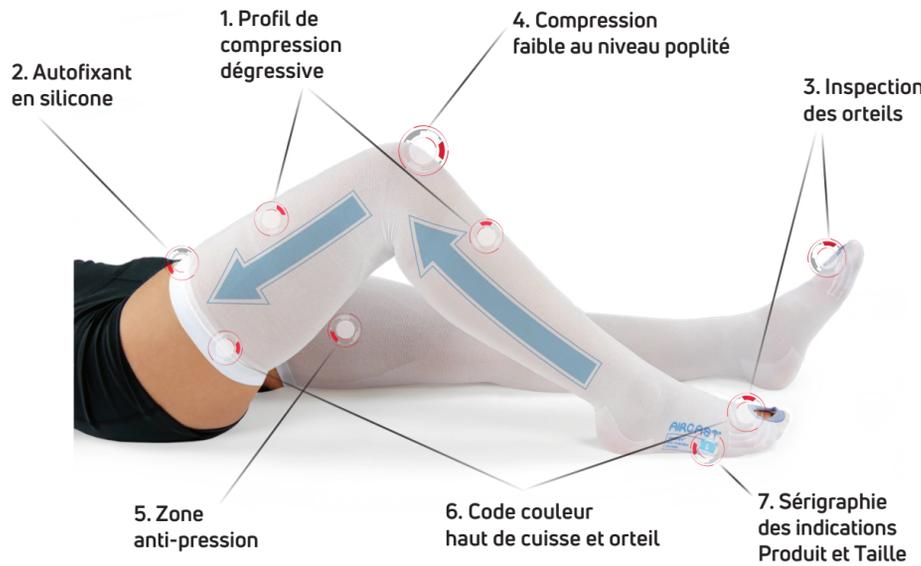

Caractéristiques des produits VenaPure™

1) Profil de compression

La gamme VenaPure™ a été créée selon l'étude de Sigel en 1975.

Il a découvert qu'un profil de compression graduel, comme ci-dessous, était plus efficace pour l'augmentation du débit sanguin artériel, lequel a un impact direct sur la prévention des stases veineuses et par conséquent, minimisant le risque de développement de TVP (Thromboses Veineuses Profondes).

Notre usine teste les produits VenaPure™ pour s'assurer que le profil de compression est correct.



2) Bas autofixant en silicone

Les bas VenaPure™ sont indiqués pour le patient immobilisé, cependant il est encore très important que les bas demeurent en place.

La demie bande en silicone fournit une excellente fixation sur la peau, en minimisant le glissement du bas, sans constriction.

3) Ouverture d'inspection des orteils

L'ouverture pour l'inspection des orteils est sur le dessus du pied, ce qui offre des avantages par rapport à la concurrence en termes de facilité, pour les professionnels de santé, de vérifier l'état du pied et de la peau.

Elle réduit également fortement le risque de récupérer des impuretés ou salissures en ambulatoire.

4) Compression faible au niveau du creux poplité

Les produits VenaPure™ proposent un soulagement réel de compression au niveau du creux poplité. La compression est ici de 8mmHg. Ceci permet d'enlever de la constriction autour de la veine poplitée qui se trouve très proche de la surface à l'arrière du genou et favorise le mouvement des jambes. La différence visible du tricotage permet d'effectuer le positionnement correct de cette zone.

5) Zone anti-pressure

Il a été prouvé dans un certain nombre de documents cliniques que la majorité des thromboses se forme dans le clapet ou la paroi de la veine fémorale. Par conséquent, il est essentiel de minimiser toute la constriction indésirable en réduisant la pression dans la zone interne de la cuisse où se situe la veine fémorale.

6) Code couleur haut de cuisse et orteils

Chaque produit possède un fil de couleur cousu spécifiquement dans le haut (bande en silicone sur la cuisse ou bande sur le genou) et au niveau de l'ouverture d'inspection des orteils. Ceci permet d'indiquer la nature et la taille du produit.

7) Sérigraphie des indications produit et taille

La poche au talon facilite le positionnement correct lors de l'application. Le logo spécialement imprimé sur le pied désigne le nom du produit, VenaPure™, et la taille du produit par le code alpha : M Regular sur cet exemple.

8) Tricotage circonférentiel incrusté

Permet de garantir la pression correcte souhaitée sur la jambe et aide à prévenir tout glissement.

Instruction de prises de mesure

IMPORTANT – pour s'assurer que la compression appliquée sur la jambe du patient soit correcte, il est essentiel de prendre des mesures précises. Utilisez ce guide pour vous assurer que le bon produit soit sélectionné.

1. Mesurer la circonférence au haut de la cuisse	
Si la circonférence de la cuisse ① < 91 cm = Mi-Bas ou Bas (avec ou sans ceinture)	Si la circonférence de la cuisse ① > 91 cm = Mi-Bas
2. Mesurer la circonférence du mollet au plus large.	2. Mesurer la circonférence du mollet au plus large.
3. Mesurer la distance entre le sol et 5 cm sous le pli fessier pour un Bas.	3. Mesurer la distance entre le sol et le creux poplité pour un Mi-bas.

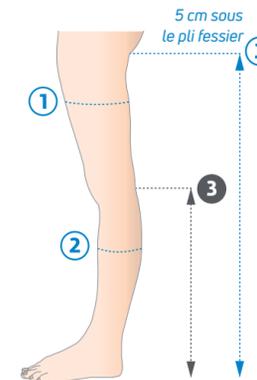


TABLEAU DES MESURES (en cm)

Les lettres présentes dans le code article renvoie à la hauteur du produit choisi (chaque hauteur à un colori) :

S : Small (Court) - **R** : Regular (Normal) - **L** : Long (Long)

1 Mi-bas

R : Regular (Normal)
L : Long (Long)



Taille	② Circ. mollet	③ Hauteur sol-creux poplite	Code article
S	< 30.5	<41	400R-2 <input type="checkbox"/>
		>41	400L-2 <input checked="" type="checkbox"/>
M	30.5 - 38	<43	400R-3 <input type="checkbox"/>
		>43	400L-3 <input checked="" type="checkbox"/>
L	38 - 44.5	<46	400R-4 <input type="checkbox"/>
		>46	400L-4 <input checked="" type="checkbox"/>
XL	44.5 - 51	<46	400R-5 <input type="checkbox"/>
		>46	400L-5 <input checked="" type="checkbox"/>
XXL	51 - 58.4	<46	400R-6 <input type="checkbox"/>
		>46	400L-6 <input checked="" type="checkbox"/>
XXXL	58.5 - 66	<46	400R-7 <input type="checkbox"/>
		>46	400L-7 <input checked="" type="checkbox"/>

Conditionnement Réf 400 Mi-Bas : Boite de 12 paires

2 Bas autofixant

S : Small (Court)
R : Regular (Normal)
L : Long (Long)



Taille	① Circ. de la cuisse	② Circ. mollet	③ Hauteur sol-pli fessier (5 cm au-dessous)	Code article
S	< 63.5	< 30.5	< 74	401S-2 <input checked="" type="checkbox"/>
			74 - 84	401R-2 <input type="checkbox"/>
			> 84	401L-2 <input checked="" type="checkbox"/>
M	< 63.5	30.5 - 38	< 74	401S-3 <input checked="" type="checkbox"/>
			74 - 84	401R-3 <input type="checkbox"/>
			> 84	401L-3 <input checked="" type="checkbox"/>
L	< 63.5	38 - 44.5	< 74	401S-4 <input checked="" type="checkbox"/>
			74 - 84	401R-4 <input type="checkbox"/>
			> 84	401L-4 <input checked="" type="checkbox"/>
XL	63.5 - 81.5	44.5 - 55	< 74	401S-5 <input checked="" type="checkbox"/>
			74 - 84	401R-5 <input type="checkbox"/>
			> 84	401L-5 <input checked="" type="checkbox"/>
XXL	81 - 91	55 - 66	< 74	401S-6 <input checked="" type="checkbox"/>
			74 - 84	401R-6 <input type="checkbox"/>
			> 84	401L-6 <input checked="" type="checkbox"/>

Conditionnement Réf 401 Bas : Boite de 6 paires

3 Bas avec ceinture

S : Small (Court)
R : Regular (Normal)
L : Long (Long)



Taille	① Circ. de la cuisse	② Circ. mollet	③ Hauteur sol-pli fessier (5 cm au-dessous)	Code article
S	< 63.5	< 30.5	< 74	402S-2 <input checked="" type="checkbox"/>
			74 - 84	402R-2 <input type="checkbox"/>
			> 84	402L-2 <input checked="" type="checkbox"/>
M	< 63.5	30.5 - 38	< 74	402S-3 <input checked="" type="checkbox"/>
			74 - 84	402R-3 <input type="checkbox"/>
			> 84	402L-3 <input checked="" type="checkbox"/>
L	< 63.5	38 - 44.5	< 74	402S-4 <input checked="" type="checkbox"/>
			74 - 84	402R-4 <input type="checkbox"/>
			> 84	402L-4 <input checked="" type="checkbox"/>
XL	63.5 - 81.5	44.5 - 55	< 74	402S-5 <input checked="" type="checkbox"/>
			74 - 84	402R-5 <input type="checkbox"/>
			> 84	402L-5 <input checked="" type="checkbox"/>
XXL	81 - 91	55 - 66	< 74	402S-6 <input checked="" type="checkbox"/>
			74 - 84	402R-6 <input type="checkbox"/>
			> 84	402L-6 <input checked="" type="checkbox"/>

Conditionnement Réf 402 Bas : Boite de 6 paires